



IM STREP A

DETECTION RAPIDE ET
QUALITATIVE D'UN ANTIGENE
SPECIFIQUE DU
STREPTOCOQUE A

Présentation du test



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- USAGE IN VITRO
 - RESPECTER REGLES HYGIENE
 - RISQUE INGESTION ET MUQUEUSES
 - TUBE DE BANDELETTE FERME
 - NE PAS MELANGER LES TROUSSES
 - DATE DE PEREMPTION
 - TEMPERATURE DE CONSERVATION ENTRE 15 ET 30 degres
-

RECUEIL ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

- PRELEVEMENT DE GORGE AVEC UN BON ECLAIRAGE
- AMYGDALES ET/OU ARRIERE GORGE
- NE PAS TOUCHER DENTS, LANGUE, GENCIVES, JOUES
- ECOUVILLONS FOURNIS UNIQUEMENT
- TEST IMMEDIAT APRES ECOUVILLON
- ENSEMMENCER LA GELOSE AVANT

Réalisation du test



MATERIEL

- LAMPE FRONTALE OU SUR PIED
 - ABAISSE LANGUE
 - KIT
 - CHRONOMETRE OU MONTRE
 - RECIPIENT POUR DECHETS
CONTAMINES
 - GANTS ??
-

MODE OPERATOIRE

=8 MINUTES

- 3 GOUTTES REACTIF 1 ET 2, solution jaune
- IMMERGER L'ECOUVILLON
- AGITER
- ATTENDRE UN MINUTE
- EXTRAIRE
- IMMERGER LA BANDELETTE
- ATTENDRE 5 minutes

Réalisation du test




Réalisation du test



Réalisation du test



Réalisation du test

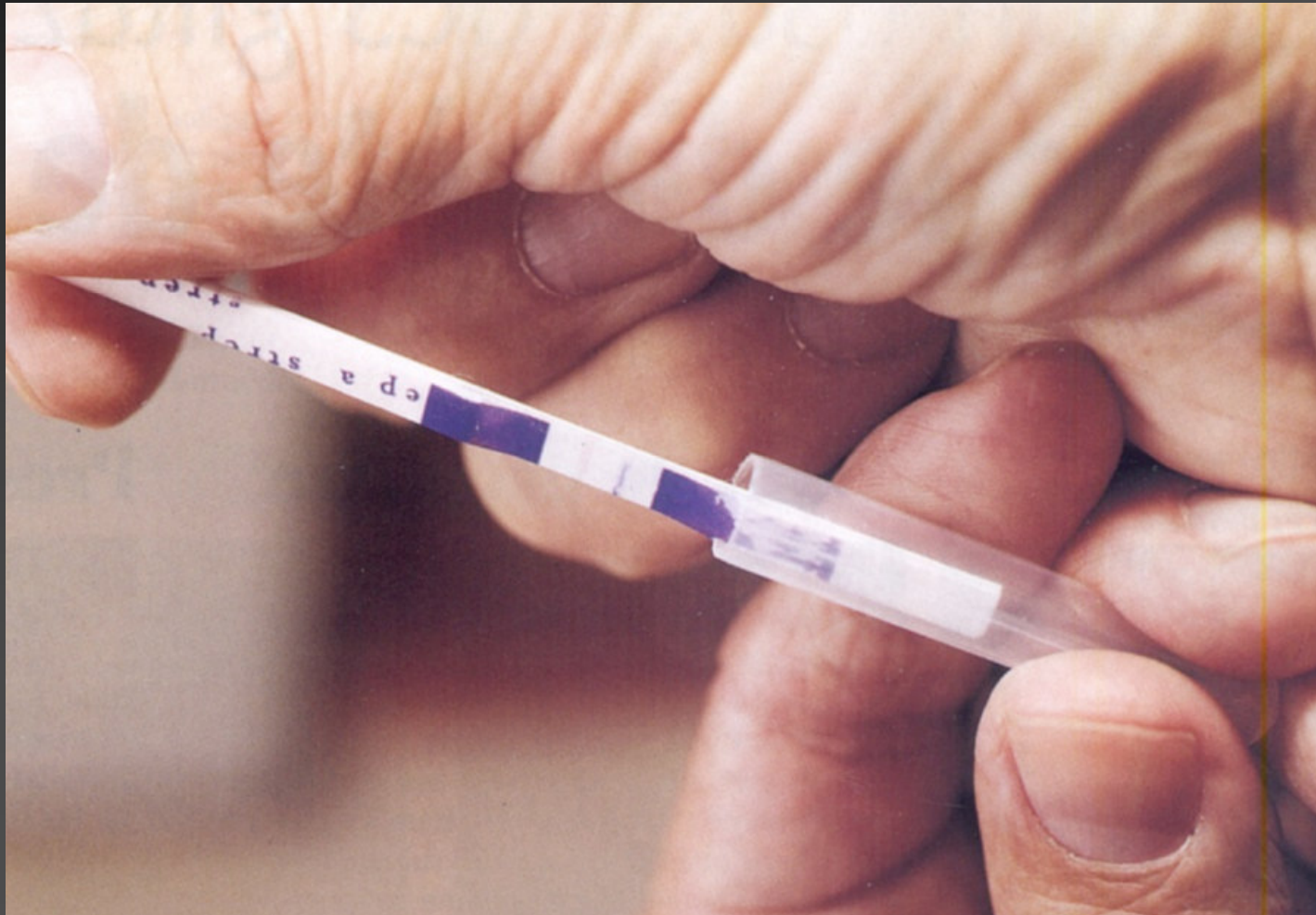


CONTRÔLE DE QUALITE

- MELANGE JAUNE CLAIR
 - LIGNE ROUGE= CONTRÔLE INTERNE
 - LE CONTRÔLE POSITIF STREP A
 - LE CONTRÔLE NEGATIF STREP C
-

IM STREP A

PROTOCOLE VISUEL SIMPLIFIE

Procédure de test

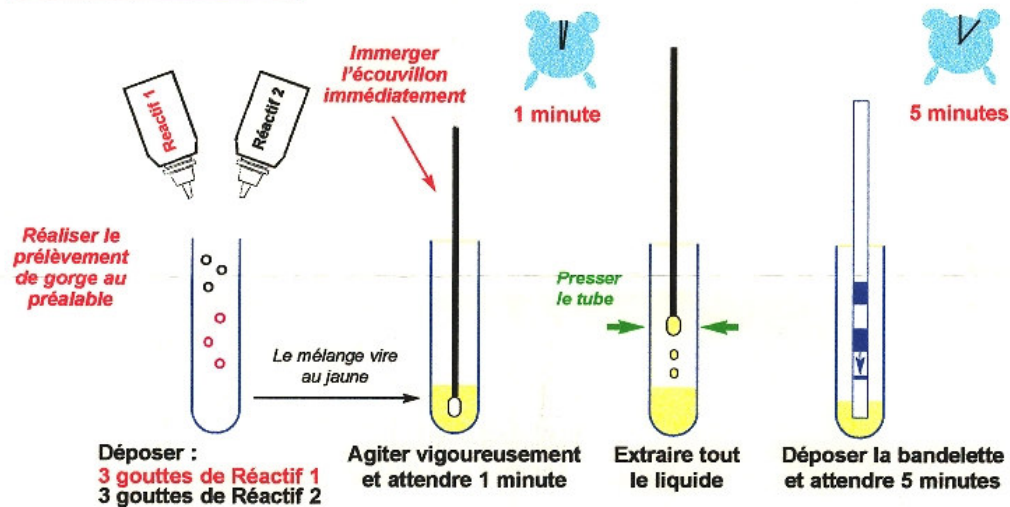

Interprétation

Les résultats positifs peuvent être lus dès que la ligne rouge apparaît.


Résultats Positifs



Résultats Négatifs



Résultats invalides

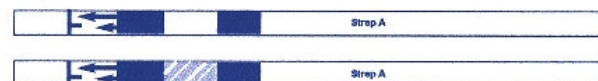

LIMITES

- TEST QUALITATIF
- VALIDE UNIQUEMENT GORGE ET CULTURE
- RESULTATS <0 si AG $<$ seuil dectection
- RESULTATS <0 si autres écouvillons

SENSIBILITE SPECIFICITE

classification	Im strep/cult	concordance
Negatifs SPEC	454/464	97.8%
Positifs <10 col	3/6	50.0%
Positifs 11-50 c	9/13	69.2%
Positifs >50 c	44/44	100%
Positifs conflue	112/112	100%
total + SENS	168/175	96%
TOTAL	622/639	97.3%